

Правильный выбор всегда за ВАМИ...



Интеллектуальные
нителиновые
БИО ДУГИ

Правильные силы для каждого этапа лечения



БиоСтартер/BioStarter®: круглые дуги, идеальны для начала лечения

БиоТорк/BioTorque®: четырехгранные термоактивные дуги для более детального лечения на последующих этапах

БиоФинишер/BioFinisher®: прямоугольные дуги для идеального завершения лечения

БиоЛингвал/BioLingual®: специально разработанные дуги для лингвального лечения

Выбор правильной силы для каждого этапа лечения.

В ортодонтии, как и в автомобильных гонках, правильное применение силы и крутящего момента имеет решающее значение: слишком много, и вы получите нежелательные побочные эффекты, слишком мало и вообще ничего не происходит. Во время каждого этапа лечения правильный выбор дуги должен гарантировать правильное применение силы. Применяя в своей практике нитиноловые термоактивные дуги компании FORESTADENT БиоСтартер и БиоТорк, Вы сможете выбрать необходимую силу коррекции для каждого этапа лечения без побочных эффектов. Клинически доказано, что нитиноловые термоактивные дуги БиоСтартер и БиоТорк суперэластичные и имеют постоянную малую силу. Клинические исследования* показали, что малые силы, созданные правильно подобранными круглыми дугами БиоСтартер, могут помочь избежать резорбции. Результат клинических исследований показал равномерное распределение давления на корень премоляра при интрузии во время ортодонтического лечения (см. рис.)



Память формы - комфортное лечение благодаря специальному сплаву.

Благодаря специальному сплаву сила у нитиноловых термоактивных дуг БиоСтартер и БиоТорк меняется за счет разницы температур. Когда сила, созданная дугой, становится некомфортной для пациента, стакан холодной воды может почти всегда снять этот дискомфорт.


Быстрый процесс лечения за счет применения эффективной силы.

Гладкая поверхность дуг БиоСтартер и БиоТорк уменьшает коэффициент трения между дугой и пазом брекета до 30%. За счет уникальных характеристик эти мягкие дуги компании FORESTADENT работают легко и эффективно. Ортодонтическое лечение проводится с меньшим количеством дуг и за более короткий период времени, что является более экономичным решением как для Вас, так и для ваших пациентов.

Оценка силы трения (граненая дуга):

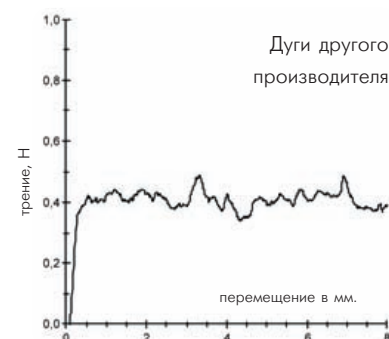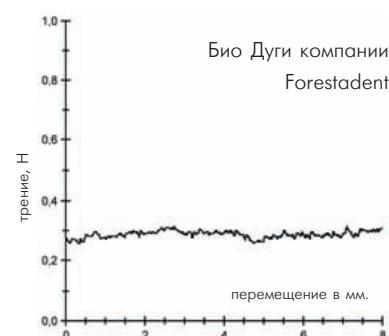


Гладкая поверхность дуг БиоСтартер и БиоТорк снижает коэффициент трения между дугой и пазом брекета на 30%.

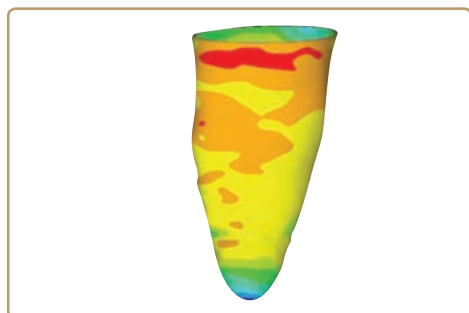

Давление на корень премоляра при интрузии во время ортодонтического лечения

*Корневая резорбция верхней челюсти первого премоляра ... Рольф Фолтин и др. ..., ортодонтия 1998, 59:208-219 (№ 4))

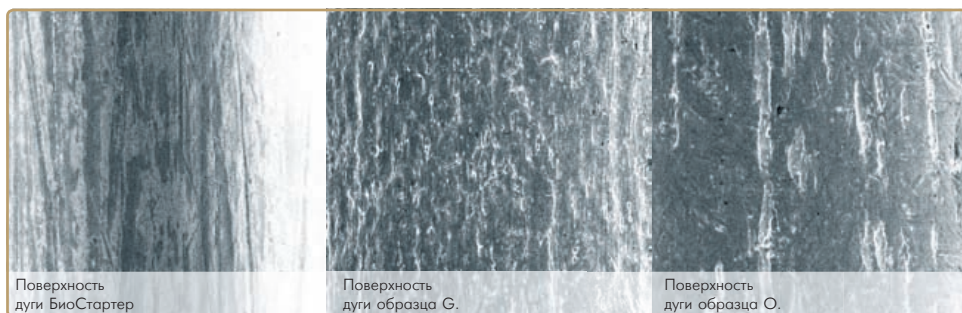

Гладкая поверхность дуг БиоСтартер и БиоТорк уменьшает трение и позволяет быстрее и эффективнее добиться результата лечения.

БиоСтартер - круглая нитиноловая термоактивная дуга .010" для особо чувствительных пациентов.

Новый размер термоактивных нитиноловых дуг .010" расширяет применение БиоСтартер даже в сложных случаях, например, у пациентов с выраженными заболеваниями пародонта и сильной скученностью зубов. Коррекция идет малыми силами, что уменьшает риск травмирования. Дуга БиоСтартер диаметром .010" также применима для чувствительных и восприимчивых к боли пациентов.

БиоТорк - дуги квадратного и прямоугольного сечения

Новые терморезактивные дуги БиоТорк компании FORESTADENT чрезвычайно эластичны - это снижает неприятные ощущения. В связи с высокой точностью размеров дуги FORESTADENT точно передают торк. Дуги имеют уникальную отполированную поверхность, которая помогает свести коэффициент трения к минимуму. Дуги могут использоваться в исключительно сложных случаях без какого-либо риска, например, у чувствительных пациентов.

БиоФинишер - дуги для идеального завершения лечения.



БиоФинишер - полноразмерная дуга, идеально подходящая на завершающем этапе ортодонтического лечения. Дуга БиоФинишер позволяет полностью реализовать передаваемый торк. Дуги имеют уникальную отполированную поверхность, которая помогает свести коэффициент трения к минимуму. Дуги могут использоваться взамен стандартным дугам большого размера на конечных этапах лечения пациента.

БиоЛингвал - специально разработаны для лингвального лечения

Серия Био дуг компании FORESTADENT включает в себя и специально разработанные дуги для лингвального лечения. Более 200 челюстей было проанализировано компьютерными технологиями для определения оптимальных форм, которые легли в основу для расчета соответствующих форм БиоЛингвальных дуг. Никельтитановые дуги БиоЛингвал производят максимальное усилие при температуре тела, точно так же, как популярные дуги БиоСтартер и БиоТорк.

Что мы предлагаем?

Время меняется, развиваются технологии и возможности производства. Закажите дуги серии БИО сегодня и попробуйте качественную и высокотехнологичную продукцию компании FORESTADENT. Технологии компании FORESTADENT для пользы Вам и Вашим пациентам!

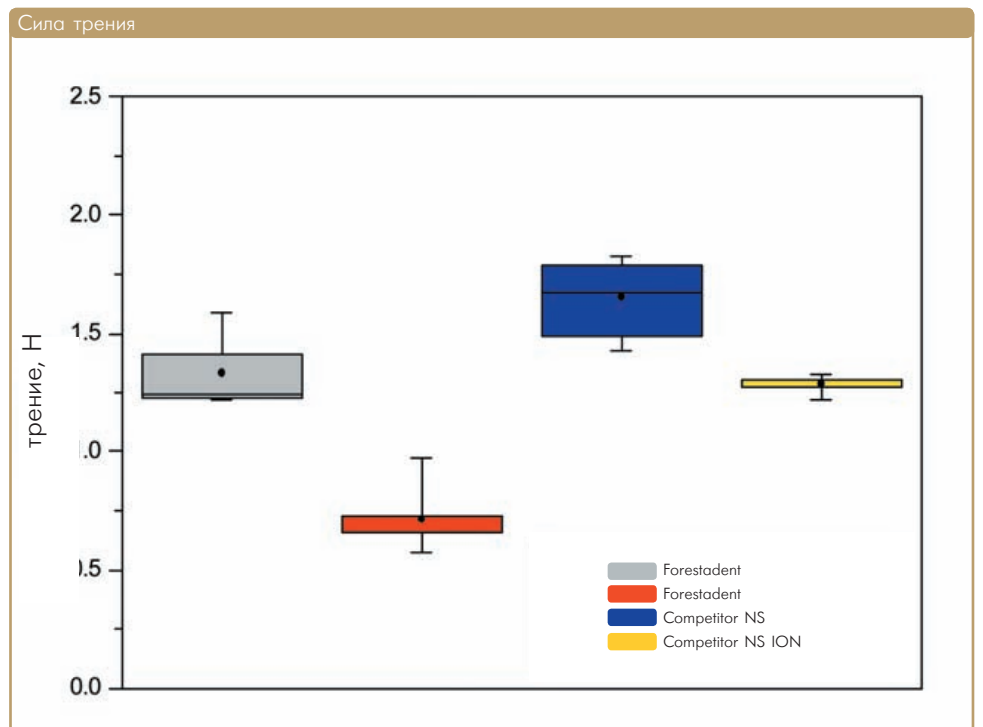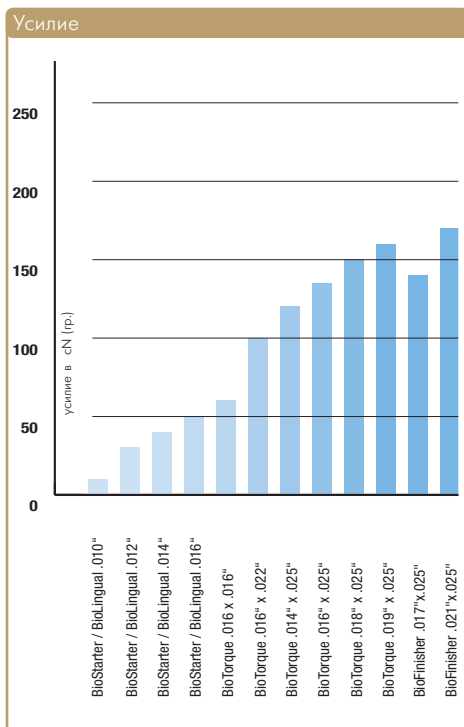








Влияние различных покрытий поверхности дуг на коэффициент силы трения.

БиоСтартер, БиоТорк




CE 0297

	профиль	усилие	размер	кол-во в упаковке	номер № ВЧ	номер № НЧ
Форма Страйт-Арч 		20 g	.010"	10	203-0825	203-0925
		30 g	.012"	10	203-0830	203-0930
		40 g	.014"	10	203-0835	203-0935
		50 g	.016"	10	203-0840	203-0940

CE 0297

Форма Страйт-Арч 		120 g	.014"x.025"	10	203-2035	203-2135
		60 g	.016"x.016"	10	203-1440	203-1540
		100 g	.016"x.022"	10	203-2040	203-2140
		135 g	.016"x.025"	10	203-2440	203-2540
		150 g	.018"x.025"	10	203-2046	203-2146
		150 g	.019"x.025"	10	203-2048	203-2148

БиоФинишер

	профиль	сечение	размер	кол-во в упаковке	номер № ВЧ	номер № НЧ
		.017" x .025"	.018"	10	203-2044	203-2144
		.021" x .025"	.022"	10	203-2053	203-2153

Дуги компании FORESTADENT



Вся продукция зарегистрирована на территории РФ и имеет сертификаты соответствия.
 Продукцию фирмы FORESTADENT Вы можете приобрести в представительствах группы компаний «Пумпа»:

Представительства оптовой торговли

г. Москва «Ортосмайл»
 тел.: (495) 603-24-66, факс: (495) 603-24-99
 orthosmile@orthosmile.ru
 г. Санкт-Петербург «Веселая Улыбка»
 тел.: (812) 600-600-8, факс: (812) 325-62-54
 smile@orthosmile.ru
 г. Екатеринбург «Фортекс-Урал»
 тел.: (343) 219-09-46, факс: (343) 261-57-42
 fortkest-ural@fortkest.ru



www.fortkest.ru
 www.forestadent.ru

Представительства розничной торговли

г. Москва «Фортекс-Т» тел.: (495) 955-92-29
 г. Санкт-Петербург «Веселая Улыбка» тел.: (812) 600-600-9
 г. Екатеринбург «Фортекс-Урал» тел.: (343) 219-09-46
 г. Краснодар «Фортекс-Юг» тел.: (861) 268-14-93
 г. Новосибирск «Фортекс-Сибирь» тел.: (383) 344-60-18
 г. Казань «Фортекс-Казань» тел.: (843) 277-23-70
 г. Иркутск «Фортекс-Иркутск» тел.: (3952) 27-19-56
 г. Калининград «Фортекс-Калининград» тел.: (4012) 70-25-31